




دانش بنیان

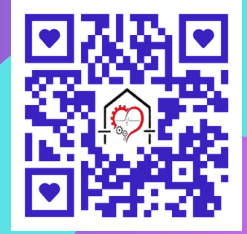

پویندگان گستر هوشمند فردا

«تجهیز آزمایشگاهی با فناوری دانش بنیان»

سمک

آدرس: میدان اقدسیه-پارک علم و فناوری نورا

تلفن: ۰۲۱ ۸۷۵۵۹۷۳۴-۰۹۲۰۳۲۷۳۷۶۴

www.pouyandegangostar.ir

سمعک مدل PGHF-1

اقدام داخل بسته:



۱- سمعک

۲- جعبه حمل

۳- سری زله ای

۴- باتری

۵- اجار تنظیم

صدا

روش استفاده

ابتدا کاور باتری را جدا کرده و با باز کردن در پوش انتهایی سمعک جایگذاری می کنید. (دقت کنید طرف



کاور دار باتری رو به بیرون باشد.

(مطابق شکل)

سپس با بستن درپوش باتری، سری زله ای را به دستگاه متصل



نمایید. (انتخاب سری زله ای مناسب یا مشورت پزشک انجام شود).

با تنظیم ولوم دستگاه، فرکانس

مناسب تنظیم شده و آماده برای استفاده است.



تخصص: آرج نوم شرقی، مرکز علم و فناوری نورا

WWW.POUYANDEGANGOSTAR.IR

info@www.Pouyandegangostar.ir

۱- برای تنظیم ولوم یا پزشک خود مشورت کنید.

۲- هنگامی که از سمعک استفاده نمیکنید ولوم را در کمترین حالت قرار دهید.

سمعک مدل PGHF-2

اقلام داخل بسته:



۱- سمعک

۲- جعبه حمل

۳- سری ژله ای

۴- سیم شارژر

روش استفاده

ابتدا سیم شارژر را متصل نموده و سمعک را تا ۲ ساعت با استفاده از شارژر USB شارژ نمایید.



سپس با دکمه ON/OFF آنرا روشن

نمایید. سری ژله ای را متصل نمایید.



این دستگاه در دو مود تقویت صدای محیط / اتصال بلوتوث به گوشی تلفن همراه (هندزفری) کار می کند. تغییر مود با استفاده از دکمه فشاری.



توسعه، تحقیق و فناوری نوین

WWW.POUYANDEGANPOSTAR.IR

info@www.Pouyandeganpostar.ir

۱- برای تنظیم ولوم یا پزشکی خود مشورت کنید.

۲- هنگامی که از سمعک استفاده نمیکنید کلید را در حالت OFF قرار دهید.



دانش بنیان

معرفی شرکت

شرکت پویندگان گستر هوشمند فردا با اتکا به دانش فنی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و استقرار در پارک علم و فناوری نورا، با بیش از ۲۰ سال تجربه تخصصی در حوزه مهندسی، طراحی و تجهیز مراکز کلینیکی و بیمارستانی فعالیت می‌نماید. این شرکت به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت تجهیزات پزشکی کشور، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، موفق به تولید محصولات دانش‌بنیان و صادرات به کشورهای منطقه و جهان شده است.



مزایای استفاده

- ساده سازی استفاده
- 1. شارژدهی بالا و قابل شارژ با کابل اندروید
- دامنظوره جهت کار با موبایل

