

سمعک مدل PGHF-2

اقلام داخل بسته:

۱- سمعک

۲- جعبه حمل

۳- سری ژله ای

۴- سیم شارژر



روش استفاده

ابتدا سیم شارژر را متصل نموده و سمعک را تا ۲ ساعت با استفاده از شارژر USB شارژ نمایید.



سپس با دکمه ON/OFF آنرا روشن نمایید. سری ژله ای را متصل نمایید.



این دستگاه در دو مود تقویت صدای محیط / اتصال بلوتوث به گوشی تلفن همراه (هندزفری) کار می کند. تغییر مود با استفاده از دکمه فشاری.



اقدسیه، خ دوم شرقی، پارک علم و فناوری نورا

WWW.POUYANDEGANGOSTAR.IR

info@www.Pouyandegangostar.ir

۱- برای تنظیم ولوم با پزشک خود مشورت کنید.

۲- هنگامی که از سمعک استفاده نمیکنید کلید را در حالت off قرار دهید.

Hearing aid model PGHF-2

Items inside the package:

1- Hearing Aid

2-Carrying Box

3-Jelly Series

4-Charger Cable



WWW.POUYANDEGANGOSTAR.IR

info@www.Pouyandegangostar.ir

instructions

First, connect charger Cable for 2 Hours.



Change mode with mode button.



1 –Consult your doctor to adjust the volume.

2 –When you are not using the hearing aid, turn it off.